

KULLANIM KLAVUZU



VİTAOZON STERİLİZASYON CİHAZI

VOST-CH & VOST-R & VOST-H
Modelleri için

**VİTAOZON SİSTEMLERİ SAĞLIK MAKİNA İMALAT
PROJE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Adres: Yeşiloba Mah.46029.Sok. Yeni Sanayi Sitesi
No:28/A Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1:Tanımlamalar	1
Marka ve Ürün Tipleri	1
Cihazın kullanım Ömrü.....	Error!
Bookmark not defined.	
Üretici Firmanın ve Yetkili Servislerin bilgileri.....	Error!
Bookmark not defined.	
Cihazın Sertifikasyon Bilgileri.....	Error!
Bookmark not defined.	
Cihaz Standartları ve Ürün Direktifleri.....	Error!
Bookmark not defined.	
Ozon hakkında.....	3
BÖLÜM 2:Cihaz sistemine Genel Bakış.....	4
Cihazın Kullanım Amacı.....	4
Cihazın Özellikleri.....	5
Ozon Sterilizasyon cihazı Tavsiye Edilmeyen Durumlar.....	6
Bölüm 3:Cihazın Kullanım İçin Hazırlanması.....	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat edilecek Hususlar.....	7
Kurma ve Montaj Bilgileri.....	7
Bölüm 4:Kullanma Bilgileri.....	7
Genel Elektrikli Aletler Kullanma Talimatları.....	7
Genel Elektrikli Aletler Kullanma Talimatları.....	8
Vitaozon sterilization VOST-CH model.....	9
Vitaozon sterilization VOST-R model.....	10
Vitaozon sterilization VOST-H model.....	11
Bölüm 5:Cihazın Çalıştırılması.....	12
Cihazın Kontrol Paneli.....	12
Kontrol Paneli Uygulama Ekranı.....	13
Bölüm 6:Bakım ve Temizlik Bilgileri.....	14
Kullanım Hatalarına ilişkin Bilgiler.....	14
Belgelendirme Kuruluşu Bilgileri.....	15
Garanti Şartları.....	16

Kılavuzun Amacı ve Yararları

Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Aksi takdirde, firmamız kişisel ihmal nedeniyle oluşacak herhangi bir problemden sorumlu olmayacaktır. Bu kılavuzda en son ürünlerimiz olan Vitaozon sterilizasyon cihazı (**VOST-CH Model**), (**VOST-R Model**) ve Vitaozon sterilizasyon cihazı (**VOST-H Model**), cihazlarımızın bilgilerini ve özelliklerini bulabilirsiniz.

BÖLÜM 1:TANIMLAMALAR

Marka ve Ürün Tipleri

Vitaozon sterilization VOST-CH model

Vitaozon sterilization VOST-R model

Vitaozon sterilization VOST-H model



OZON HAKKINDA

Ozon (O₃) 3 oksijen atomundan meydana gelen bir gazdır. Doğada soluduğumuz oksijen atmosferde yükseldiği zaman güneşten gelen ultraviyole ışınlarla maruz kaldığında ozon gazına dönüşür. Havadan daha ağır bir gaz olmasından dolayı yeryüzüne doğru alçalır. Gök gürültülü havalarda etrafımızda hissettiğimiz temizlik ve ferahlık kokusu aslında ozon gazıdır.

Ozon dünyadaki en güçlü dezenfektanlardan biridir. Yaşadığımız ortamda bulunan hava veya su içerisindeki bakteri, virüs ve mikropları çok kısa sürede yok eder.

Ozon yüksek oksidasyon gücüne sahip keskin kokulu bir gazdır. Çok kuvvetli bir sterilizasyon gücüne sahip olmasının yanında oldukça da kısa bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu sebeple dezenfeksiyon amacıyla kullanıldığında doğru miktarda ozon gazının sterilize edilecek ortamda ideal zaman zarfında reaksiyona girmesi sağlanmalıdır. Ozon kokusu insanlar tarafından kolaylıkla hissedilir ve uzun süreli solunmamalıdır.

Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. Bu nedenle marketler, alışveriş merkezleri, plazalar, oteller, hastaneler, fabrikalar, eğitim kuruluşları, üretim tesisleri gibi tüm kapalı alanların havalandırma ünitelerine veya klima santrallerine aktif ozon uygulayarak mekânlarınızı bakteri ve virüslerden arındırabilirsiniz.

BÖLÜM 2: CİHAZ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Cihazın Kullanım Amacı

Kapalı ortamlarda soluduğunuz havanın kalitesini artıran, ortamlardaki sigara, yemek, küf, rutubet gibi kötü kokuları ozon teknolojisi ile gideren teknoloji ve etkisi büyük bir VİTAOZON ürünüdür.

Oksijen atomlarını Ozon molekülüne çevirerek ortamın havasındaki mantar sporları, mikroorganizmaları ve koku partiküllerini ortadan kaldırır.

Kalıntısız bir hava sterilizasyonu sağlar ve soluduğunuz havanın kalitesini artırır.

Hava temizleme özelliğinin yanında özel bir aparat ile kullandığınız suyu ozonlayarak, mutfakta besinlerin temizliği için kullanabilirsiniz.

Mutfak dışında da evinizde, ofisinizde sterilize etmek istediğiniz her noktada suyunuzu ozonlayarak hijyen sağlayabilirsiniz.

Ozon teknolojisi ile hava temizleme yöntemi kalıntı bırakmaz ve organik bir tepkime sonucu oluşan bir etkidir. Fakat temizleme sürecinden üretilen ozon direk solunuma uygun olmadığından mekânlarınız da hava temizliğini gerçekleştirirken, cihaz çalışırken ortamda bulunmanız önerilmez. Bunun sebebi ozonun direk solunuma uygun olmamasıdır.

Cihazın Özellikleri

Vitaozon sterilization VOST-CH model

- Ebatlar:55 cm L x 40 cm H x 30cm B
- Ağırlık: 8 KG
- Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
- Dijital zaman ayarı
- Sarf malzeme yoktur
- Tesisat gerektirmez

Vitaozon sterilization VOST-R model

- Ebatlar:55 cm L x 55 cm H x 50 cm B
- Ağırlık: 10 KG
- Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
- Dijital zaman ayarı
- Sarf malzeme yoktur
- Tesisat gerektirmez

Vitaozon sterilization VOST-H model

- Ebatlar:55 cm L x 100 cm H x 50 cm B
- Ağırlık: 15 KG
- Enerji: 220 VAC 50 / 60 Hz
- Dijital zaman ayarı
- Sarf malzeme yoktur
- Tesisat gerektirmez

Ozon Sterilizasyon Cihazı Kullanımında Tavsiye Edilmeyen Durumlar.

Ozon Sterilizasyon cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından insan bulunan ortamlarda ozon miktarınının 0,05 ppm' i aşmaması tavsiye edilmektedir. Bu miktarın üzerinde ozona maruz kalındığında üst solunum yollarında tahrişe rastlanabilir. 0,05 ppm zaman süreli verilirse zararlı etkisi yoktur.

Ozonun hava ve sudaki konsantrasyonu "ppm" parts per million – milyonda parça olarak ifade edilir. Havada bulunan 1 ppm ozon, yaklaşık olarak 2,1 mgr/m³ ozona eşittir.

Sürekli soluma emniyet seviyesi 0,050 ppm'dir.

0,020 ppm ozon havadaki bakterilerin %90'nını yok eder.

Kesinlikle; ozon jeneratörünün çalıştığı ortamlarda uzun süre durmayınız, Uyku esnasında ozon jeneratörünü çalışır durumda bırakmayınız, Uzun süre çalışır durumda bıraktığınız ozon jeneratörünün bulunduğu ortamı, en az 1 saat boş ve ozon jeneratörü çalışmazken dinlendirdikten sonra kullanmaya başlayınız

Bölüm 3:CİHAZIN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

Taşıma: cihaz taşıma kulplarında tutularak taşınmalıdır. kesinlikle cihaz zemine sürtündürerek taşınmamalıdır.

Nakliye: cihaz özel kutusunda muhafaza edilerek nakliye firması ile müşteriye kapı teslimi yapılır. cihaz teslim alındıktan sonra muhafazası ve korunması müşteriye aittir.

Kurma ve montaj Bilgileri

Montaj ve kurulum vitaozon teknik servis personeli tarafından yapılacaktır.

Bölüm 4:KULLANMA BİLGİLERİ

Genel Elektrikli Aletler Kullanma Talimatları

Diğer elektrikli aletlerin kullanımında olduğu gibi, yangın, elektrik şoku ve yaralanma risklerine karşı önlem almak için öncelikli olarak lütfen aşağıdaki yazılı bilgileri uygulayınız.

1. Cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
2. Cihazınızı mutlaka 220-240V (50-60 HZ) elektrik şebekesine bağlı topraklı prize takınız.
3. Cihaz kablosu zedelenmemelidir. Bu nedenle ısıveren cihazlara (Radyatör.vs) gibi cihazların yakınına koymayınız.
4. Elektriksel tehlikelere karşı cihazın içine su ya da başka sıvı kaçırmayınız.
5. Elektrikli cihazlar engelli, yaşlı veya çocukların olduğu ortamlarda çalıştırıldığında mutlaka ortamda nezaret edecek bir ebeveyn olmalıdır. Çocukların kesinlikle cihazla oynamasına özen gösterilmelidir.

6. Cihazınızı taşıırken, temizlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka fişini prizden çekiniz. Direkt fişi çekip (kabloyu değil) çıkardığınızdan emin olunuz.
8. Cihaz kablosu hasar görmüşse, hava fanı çalışmıyorsa, cihaz fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa veya herhangi bir nedenle düşmüş ve hasar görmüşse cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Tamir ve bakım için mutlaka üretici, satıcı firmayı ya da yetkili servisini ayırınız.
9. Yangın, elektriksel şok ve yaralanmaya sebep olmamak için cihazınızı üreticinin tavsiyeleri dışında kullanmayınız. Mutlaka bu kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara riayet ediniz.
10. Cihaz sürekli kullanım için tasarlanmadığından, zaman saati ile kullanılması dışında verilen garanti şartları geçerli değildir.
11. Asla, cihaz hava giriş ve çıkış kanallarını kapatmayınız ve tıkamayınız. Ya da buna neden olabilecek yerlerde çalıştırmayın. Çalışırken üzerini örtmeyiniz.
12. Cihazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
13. Kesinlikle cihazınıza herhangi bir cisim sokmayınız ve tamir etmeyi denemeyiniz ve mutlaka yetkili servisi arayınız
14. DİKKAT: Cihazınızda bulunan komponentlere, çalışma hızı ve süresine müdahale edecek herhangi bir başka cihazı kesinlikle kullanmayın ve adapte etmeyin.
15. Kesinlikle, cihazınızın üzerine herhangi bir şey koymayın.
16. Cihazınızın emniyet bandını çıkartmayınız, cihazınızı açmayınız.
17. Cihazınız aşırı tozlu, kimyasal buharı veya yağ buharı içeren ortamlarda çalıştırmayınız.

LÜTFEN BU KULLANIM BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE MUHAFAZA EDİNİZ

Vitaozon sterilization VOST-CH model



Açma/ Kapama

Taşıma Kulpu

Dijital ekran



Acil Stop

Start Butonu

Vitaozon sterilization VOST-R model



Vitaozon sterilization VOST-H model



Bölüm 5:CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

- 1.Ozon sterilizasyon cihazının fişini prize takınız.
- 2.Cihazı açma/kapama düğmesini açınız.
- 3.Cihazın kontrol paneli ekranından ayarları yapınız
(bakınız kontrol paneli açılış ekranı)
- 4.Cihaz ön panelinde bulunan start butonuna basınız.

Cihazın Kontrol Paneli



Kontrol Paneli Uygulama Ekranı

1.Çalışma Zamanı:Cihaz ayarladığınız süre kadar çalışır.

2.Bekleme Süresi:Cihaz ayarladığınız süre kadar bekler

3.Ayar İçin:SET tuşuna kısaca basıp bırakın.Üst tarafta kırmızı çalışma zamanı ekranı yanıp sönecektir bu durumda iken yukarı(Arttırma) ve aşağı(Azaltma) tuşları ile istediğiniz zamanı belirleyin,ardından SET tuşuna bir kere basıp işlem bittikten sonra girdiğiniz değerler hafızaya alınmış olacaktır.

4.Cihazın Çalıştırılması:Ayarları yapılan cihaz üzerinde bulunan start butonu ile çalıştırılır.start butonu cihaz üzerinde gösterilmiştir.(Bakınız bölüm 4:kullanma bilgileri.)

ÖNERİLEN UYGULAMA SÜRELERİ

ALAN(M ²)	SÜRE(DK)
1m ² -50m ²	15 dakika
51m ² -100m ²	30 dakika
101m ² -200m ²	60 dakika
201m ² -400m ²	120 dakika

Bölüm 6:BAKIM VE TEMİZLİK BİLGİLERİ

Bakım,Onarım ve Kullanım Kuralları

Cihazın bakım ve onarımı sadece firma yetkili servis personellerince yapılmalıdır.firma yetkili servis personeli harici kişilerce cihaza onarım ve bakımı için kesinlikle müdahale edilmemelidir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

Ayda bir kez fanları temizleyin,Makineyi temiz tutun ve çevresi kuru olsun.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

Kullanmadığınız zaman cihazın elektrik devresini kapalı tutunuz,Cihazın havalandırma fanı önünü açık tutunuz, Sistemlerde herhangi bir hasar veya arızanın alarmı olursa derhal cihazı kapalı konuma getirip yetkili servise başvurun. Temizlikten önce mutlaka cihazın fişini çekiniz. Sadece kuru temiz bir bez ile temizlik yapınız. Islak veya temizleyici madde sürülmüş bez kullanmayınız.

Eğer makine statik elektrik oluşturursa makineyi durdurup kablo fişini çekin.

Cihaz üzerinde yazan voltaj ve gerilim değerleri hiçbir suretle aşılmamalıdır.Cihazın kapağı kesinlikle açılmamalı.

Sağlam olmayan kablolar mutlaka değiştirilmelidir.

Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Sıcak nemli yerlerde ve direk güneş ışığı altında çalıştırmayınız.

Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

VİTAOZON SİSTEMLERİ SAĞLIK MAKİNA İMALAT PROJE
TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok. Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

“CE” işareti ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon faks ve e-mail vb),
BENART ULUSLAR ARASI TEKNİK KONTROL VE
BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

Adress: Alinteri Bulvarı Gül 86 Koop.1151.Sok.No:1/66 Ostim
Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

Phone: +90 312 442 40 35

Fax : +90 312 442 40 32

E-mail: info@benart.com.tr

Web:benart.com.tr

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar!

Kullanım sırasında cihazın bulunduğu ortamın havalandırması olmalıdır

GARANTİ ŞARTLARI

- 1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2.Garanti süresi içerisinde kullanım hatalarından kaynaklı hasar ve arızalar,voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı,hatalı elektrik tesisatı,ürünün müşteriye tesliminden sonraki nakliye,taşıma sırasında oluşan hasar,arızalar,ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklı arızalar garanti kapsamına dahil değildir.

İmalatçı Firma:Vitaozon Sistemleri Sağlık Makine İmalat Proje Taahhüt İthalat İhracat San. Tic.Ltd.Şti.

Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok.Yeni Sanayi sitesi No:28/A

Telefon:0536 399 3379

Email:vitaozonsauna@gmail.com

Malın Cinsi:Ozon Sterilizasyon cihazı

Modeli:

Seri No:

Teslim Tarihi:

Garanti Süresi:2 yıl

Satıcı Firma-Kaşe İmza



VITA OZON
OZON SAUNA SYSTEME

- Web sitemizi ziyaret edin
- Bizi telefonla arayın
- Satın aldığınız için teşekkür ederiz

VİTAOZON

Yeşiloba Mah.46029.Sok.
Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan/ADANA

Telefon: (536) 399 3370

TÜRKİYE