

Bölüm 4:KULLANMA BİLGİLERİ

Oturaklı Ozon sauna



Resim 1: Vitaozon oturaklı ozon sauna VOSN-O model
1.Açma kapama 2.Acil stop

KULLANIM KLAVUZU



VİTAOZON SAUNA

VOSN-O & VOSN-Y
Modeller İçin

**VİTAOZON SİSTEMLERİ SAĞLIK MAKİNA İMALAT
PROJE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMETED ŞİRKETİ**
Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok. Yeni Sanayi Sitesi
No:28/A Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1:Tanımlamalar	1
Marka ve Ürün Tipleri	1
Cihazın kullanım Ömrü.....	7
Üretici Firmanın ve Yetkili Servislerin bilgileri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Cihazın Sertifikasyon Bilgileri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Cihaz Standartları ve Ürün Direktifleri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Opsiyonel Verilebilecek Sistemler.....	3
BÖLÜM 2:Cihaz sistemine Genel Bakış.....	3
Cihazın Kullanım Amacı.....	3
Cihazın Özellikleri.....	4
Ozon Sauna Tavsiye Edilmeyen Durumlar.....	5
Bölüm 3:Cihazın Kullanım İçin Hazırlanması.....	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat edilecek Hususlar.....	5
Kurma ve Montaj Bilgileri.....	5
Cihazın Su Deposunun Kontrolü.....	5
Bölüm 4:Kullanma Bilgileri.....	6
Oturaklı Ozon sauna.....	6
Oturaklı ozon sauna su deposu Şeması.....	7
Yataklı Ozon Sauna	7
Yataklı Ozon Sauna su deposu şeması.....	8
Bölüm 5:Cihazın Çalıştırılması.....	8
Kontrol Paneli Açılış Ekranı.....	9
Kontrol Paneli Uygulama Ekranı.....	10
Bölüm 6:Bakım ve Temizlik Bilgileri.....	11
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler.....	12
Garanti Şartları.....	13

Ozon Sauna Tavsiye Edilmeyen Durumlar

- Yüksek tansiyonlulara,
- Kalp yetmezliği olanlara,
- B1 bloker ilaç kullananlara,
- Alkol alan kişilere,
- Sara hastalarına,
- Panik atak hastalarına,
- Sıcağa dayanamayanlara,
- Hamilelere

Ozon sauna tavsiye edilmez!..

Bölüm 3:CİHAZIN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

Taşıma: cihaz taşıma kulplarında tutularak taşınmalıdır. kesinlikle cihaz zemine sürtündürerek taşınmamalıdır.

Nakliye: cihaz özel kutusunda muhafaza edilerek nakliye firması ile müşteriye kapı teslimi yapılır. cihaz teslim alındıktan sonra muhafazası ve korunması müşteriye aittir.

Kurma ve montaj Bilgileri

Montaj ve kurulum vitaozon teknik servis personeli tarafından yapılacaktır.

Cihazın Su Deposunun Kontrolü

Cihaz çalıştırılmadan önce cihazda bulunan su tankında su olup olmadığı kontrol edilir. Su tankında su gösterge seviyesindeki su seviyesi minimum yarı seviyesinde olmalıdır.

Cihazın Özellikleri

Vitaozon oturaklı ozon sauna VOSN-O model

- Ebatlar:165 cm L x 130 cm H x 75 cm B
- Ağırlık: 90 KG
- Enerji: 220V – 2000W – 10A 50-60Hz
- 7/24 Satış Sonrası Destek
- Cihazın kendini sterilize etme özelliği vardır.
- Sarf malzeme yoktur
- Paslanmaz 20'litrelik su deposu
- Türkçe,İngilizce ve Almanca dil seçenekli ekran ve yazılım
- Tek tuşla otomatik kontrol imkanı
- Tesisat gerektirmez
- Emniyetli su buhar kazanı

Vitaozon Yataklı ozon sauna VOSN-Y model

- Ebatlar:242 cm L x 100 cm H x 80 cm B
- Ağırlık: 90 KG
- Enerji: 220V – 2000W – 10A 50-60Hz
- 7/24 Satış Sonrası Destek
- Cihazın kendini sterilize etme özelliği vardır.
- Sarf malzeme yoktur
- Paslanmaz 10'litrelik su deposu
- Türkçe,İngilizce ve Almanca dil seçenekli ekran ve yazılım
- Tek tuşla otomatik kontrol imkanı
- Tesisat gerektirmez
- Emniyetli su buhar kazanı

Kılavuzun Amacı ve Yararları

Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.Aksi takdirde,firmamız kişisel ihmal nedeniyle oluşacak herhangi bir problemden sorumlu olmayacaktır.Bu kılavuzda en son ürünlerimiz olan Vitaozon oturaklı ozon sauna(**VOSN-O Model**) ve Vitaozon yataklı ozon sauna(**VOSN-Y Model**) cihazlarımızın bilgilerini ve özelliklerini bulabilirsiniz.

BÖLÜM 1:TANIMLAMALAR

Marka ve Ürün Tipleri

Vitaozon oturaklı ozon sauna VOSN-O model

Vitaozon Yataklı ozon sauna VOSN-Y model



VOSN-O Model



VOSN-Y Model

Cihazın Kullanım Ömrü

Vitaozon sauna cihazının kullanım ömrü 10 yıldır.

Üretici Firmanın ve Yetkili Servislerin bilgileri

Vitaozon Sistemleri Sağlık Makina İmalat Proje Taahüt
İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok.Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

Cihazın Sertifikasyon Bilgileri

Ürünler CE,İSO 9001 ve İSO 13485 Belgelerine Sahiptir.



Cihaz Standartları ve Ürün Direktifleri

Alçak gerilim yönetmeliği 2014/35/AB

TS EN 60335-1:2012 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Elektrikli cihazlar için-Bölüm 1:Genel Kurallar –Tek fazda 250 V'diğerlerinde 480 V'u aşmayan beyan geriliminde çalışan,Ev ve benzeri yerlerde ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazlar.

Opsiyonel Verilebilecek Sistemler

Oksijen konsantratörü: Oksijen konsantratörü, havada serbest şekilde mevcut olan oksijeni süzerek, % 90 - 95 oranında saf hale getiren bir cihazdır.

BÖLÜM 2:CİHAZ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Cihazın Kullanım Amacı

Ozon Sauna; sıcak kabin içinde deri yolu ile vücuda oksijen verilme yöntemidir. Ozon sauna ile ısı, derinin 4 ile 6 santimetre altına etki eder. Buharlı klasik saunaya göre yedi kat daha fazla terleme sağlar. Günümüzde bi çok insan saunanın rahatlatıcı etkisinin farkındadır ve bunu bir rahatlama aracı olarak kullanmaktadır. Ozon sauna, klasik saunalardan farklıdır. Ozon saunasının faydalarından dolayı kullanımı giderek artmaktadır. Ozon sauna uygulaması kas esnekliğini artırır. Akciğer, kolon ve böbreklerde toksik maddeleri atmakta yardımcı rol oynar. Hasarlı kasların hızla onarılmasında yardımcı etki sağlar. Ozon sauna sterilizasyon etkisi nedeniyle enfeksiyon riskinin ortadan kalkmasında yardımcı olur. 20 dakikalık ozon saunası senası yaklaşık 400-500 kalori arasında kalori kaybı sağlar. Ozon sauna zayıflama, hücresel yenilenme ve kas sağlığına katkı sağlayabilir.

Ozon Sauna uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta; uygulama sonrası çok fazla sıvı kaybı olacağı için mineral eksikliği yaşamamak için bol sıvı(1-1,5 litre) tüketmeliyiz. Gerekirse, takviye mineral içeren ürünler kullanmalıyız.



VITA OZON
OZON SAUNA SYSTEME


- Web sitemizi ziyaret edin
- Bizi telefonla arayın
- Satın aldığınız için teşekkür ederiz

VİTAOZON

Yeşiloba Mah.46029.Sok.
Yeni Sanayi Sitesi No:28/A
Seyhan/ADANA

Telefon: (536) 399 3370


TÜRKİYE

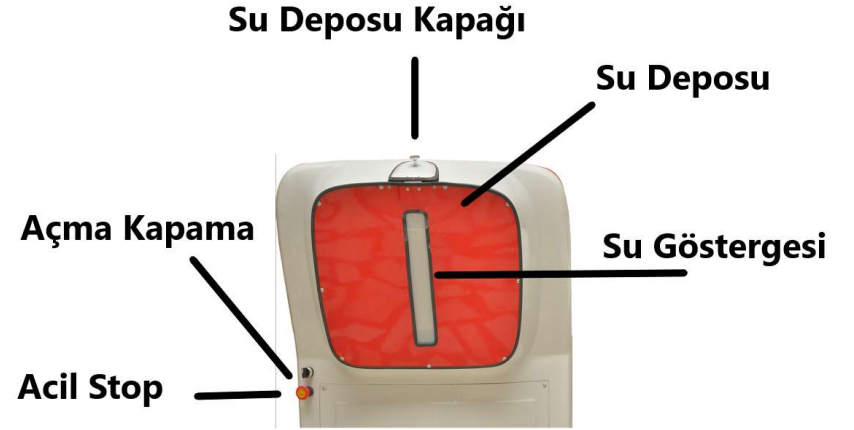

Şema 1: Vitaozon oturaklı ozon sauna VOSN-O model su deposu



Resim 2 : Vitaozon Yataklı ozon sauna VOSN-Y model

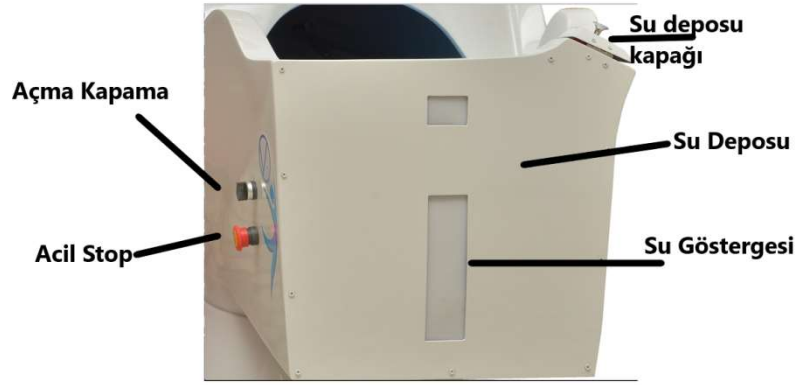

Şema 2: Vitaozon yataklı ozon sauna VOSN-Y model su deposu

Bölüm 5: CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

1. Ozon sauna cihazı fişini prize takınız.
2. Cihazın su deposundaki su miktarını kontrol ediniz.
3. Cihazı açma/kapama düğmesini açınız.
4. Cihazın kontrol paneli ekranından dil seçeneğini seçiniz
5. Kontrol panelinde “**Devam etmek için tıklayınız**” seçeneğini seçiniz.
6. Kontrol panelinde yeni gelen ekranda “**Hazırlık Başlat**” seçeneğini seçiniz. (Cihazın kabin sıcaklığı 30° ulaştığında alarm sesi gelir ve cihaz seansa hazır hale gelir.)
7. Cihaz hazır hale geldiğinde mevcut olan **ANTIANGING, SELULIT, VARIS, SEDEF, ZONA** ve **ILROMATIZ** seans seçenekleri seçilir. Ayrıca Manuel seans seçeneği seçilerek farklı bir seans uygulaması yapılabilir.
8. Seans bittiğinde kontrol panelinden “**STERİLİZASYON BAŞLAT**” seçeneği seçilerek cihaz sterilizasyonu yapılır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Garanti süresi içerisinde kullanım hatalarından kaynaklı hasar ve arızalar, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün müşteriye tesliminden sonraki nakliye, taşıma sırasında oluşan hasar, arızalar, ürünün kullanım klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklı arızalar ve cihaz kapak amortisörü garanti kapsamına dahil değildir.

İmalatçı Firma: Vitaozon Sistemleri Sağlık Makine İmalat Proje Taahhüt İthalat İhracat San. Tic.Ltd.Şti.

Adres: Yeşiloba Mah.46029.Sok.Yeni Sanayi sitesi No:28/A

Telefon: 0536 399 3379

Email: vitaozonsauna@gmail.com

Malın Cinsi: Ozon Sauna cihazı

Modeli:

Seri No:

Teslim Tarihi:

Garanti Süresi: 2 yıl

Müşteri İsim/Unvan:

Adres:

İmza:

Satıcı Firma-Kaşe İmza

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

Ozon saunada cihazında Şebeke suyu kullanılmamalıdır. Cihaz temizlik talimatları dışındaki malzemeler ile cihaz temizliği yapılmamalıdır.

Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,
VİTAOZON SİSTEMLERİ SAĞLIK MAKİNA İMALAT PROJE TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

Adres:Yeşiloba Mah.46029.Sok. Yeni Sanayi Sitesi
No:28/A Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
TEL:0536 399 3379

“CE” işareti ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon faks ve e-mail vb),
QCS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO.

Address: Postkamp 59 229 Ahlen / Germany
Phone: +49 238 22750317
E-mail: info@qcscert.com

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar!
Kullanım sırasında cihazın bulunduğu ortamın havalandırması olmalıdır

Cihazın Kontrol Paneli



Kontrol Paneli Açılış Ekranı

1.Su seviyesi Kontrol Uyarısı

2.Türkçe Dil Seçeneği

3.Almanca Dil Seçeneği

4.İngilizce dil Seçeneği

5.”DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ” Seçeneği



Kontrol Paneli Uygulama Ekranı

- 1."HAZIRLIK BAŞLAT" Seçeneği
- 2.Kabin Sıcaklığı Göstergesi
- 3.Seans Seçiniz uyarısı
- 4."ANTIANGİNG" Seans Seçeneği
- 5."SELULİT" Seans Seçeneği
- 6."VARİS" Seans Seçeneği
- 7."SEDEF" Seans Seçeneği
- 8."ZONA" Seans Seçeneği
- 9."İLTROMATİZ" Seans Seçeneği
- 10."STERİLİZASYON BAŞLAT" Seçeneği

Bölüm 6:BAKIM VE TEMİZLİK BİLGİLERİ

Bakım,Onarım ve Kullanım Kuralları

Cihazın bakım ve onarımı sadece firma yetkili servis personellerince yapılmalıdır.firma yetkili servis personeli harici kişilerce cihaza onarım ve bakımı için kesinlikle müdahale edilmemelidir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

VİTAOZO cihazınızın içi: VİTAOZON cihazınızın iç kısmı kullanımdan (her seanstan sonra)sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra nemli bir bezle temizlenmelidir. herhangi bir seyreltilmiş çamaşır suyu ,deterjan ve kimyasal malzeme kullanılmamalıdır.

Buhar Kazanı içi: Buhar kazanının içi kireçlenmemesi için damıtılmış su kullanılmalıdır,Cihazda kesinlikle şebeke suyu kullanılmamalıdır.

VİTAOZON CİHAZI DIŞI : cihazın dışı antibakteriyel boya ile boyanmış olup sadece nemli bir bez ile temizlenmelidir.hiç bir şekilde su ile yıkanmaz

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

900 seans sonra firma teknik servis personeli tarafından cihazın periyodik bakımı yapılacaktır.cihaz 950 sonra kendini kilitleyebilir.periyodik bakım sadece firmanın teknik servis personeli tarafından yapılabilir.